

ANWENDUNG VISALYS® TEMP



1

Situationsabformung erstellen

Vor der Präparation Ausgangssituation mit einer Situationsabformung festhalten (wenn möglich). Geeigneten Abformlöffel und Abformmaterial auswählen.



2

Situationsabformung bearbeiten

Die Situationsabformung mit einem Skalpell zurückschneiden; störende Interdentalsepten einkürzen; Kontrolle, ob sich die Abformung störungsfrei reponieren lässt.



3

Erstverwendung und Einsatz


Beim erstmaligen Aktivieren der Kartusche muss sichergestellt werden, dass beide Komponenten gleichzeitig austreten. Dieses Gleichfahren ist nur bei der ersten Verwendung notwendig, danach muss kein Verwurf mehr erfolgen.



4

Applizieren in die Abformung


Von der Okklusalfäche aus befüllen. Mit der Spitze der Mischkanüle immer im Material bleiben, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Die Menge des Materials sollte den Zahnfleischsaum nicht überschreiten.

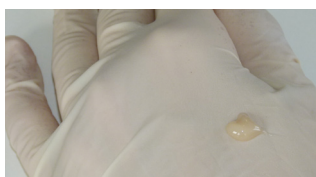

5

Einbringen in den Patientenmund

Innerhalb von 40 Sekunden nach Mischbeginn mit leichtem Druck in den Patientenmund einbringen.

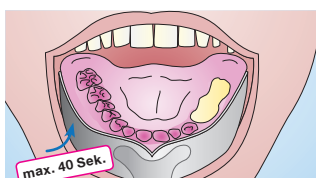

Abformlöffel (wir empfehlen verwindungssteife Löffel ohne Perforation, um den Staudruck hoch zu halten), Abformmaterial

Es empfiehlt sich die Verwendung eines A-Silikons, wie z. B. **Silginar®** (unbegrenzt lagerfähig, kann mehrfach ausgegossen werden, d. h. es muss nur 1 Situationsabformung erstellt werden! Die hohen Rückstelleigenschaften sorgen für präzise Ergebnisse). Für kleinere Arbeiten sind partielle Löffel (z. B. die Multi Trays von Kettenbach) zeitsparend und wirtschaftlich.

Skalpell

Interdentalsepten in der Abformung ausschneiden; ggf. Mittellinie zwischen den Schneidezähnen zwecks Markierung mit einer Kerbe kennzeichnen. Benachbarte bestehende Restaurationen aus Komposit z. B. mit Vaseline bestreichen, um Anhaften zu verhindern.

Beim regelmäßigen Einsatz ist vor dem Befüllen der Abformung zu beachten, dass eine geringe Menge des provisorischen Kunststoffes ausgetragen wird, um ein korrektes Mischungsverhältnis zu gewährleisten.

Visalys® Temp, Applyfix® 6 Austragpistole, Mischkanüle blau-orange

Tipp: Vor dem Befüllen der Abformung Stoppuhr starten, um die Verarbeitungszeit kontrollieren zu können. Nach dem Befüllen der Abformung eine erbsengroße Menge Material auf den behandschuhten Handrücken austragen; daran kann der Aushärtegrad extraoral geprüft werden.

Stoppuhr