

DOSIERTABELLE

Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Instrumenten-Reinigungs- oder Desinfektionsmittel-Lösung. Die Anwendungslösung ist aus Konzentrat und Wasser herzustellen. Um 5 Liter Anwendungslösung mit einer 2%igen Konzentration herzustellen, müssen 100 ml des Konzentrates zu 4,9 Liter Wasser hinzugefügt werden.

Konzentration der Anwendungslösung	0,25 %	0,50 %	1,00 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %	3,00 %	4,00 %	5,00 %	10,00 %
Menge der Gebrauchslösung	Menge des Konzentrates									
1 Liter	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	40 ml	50 ml	100 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	80 ml	100 ml	200 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	120 ml	150 ml	300 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	160 ml	200 ml	400 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	200 ml	250 ml	500 ml
6 Liter	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	240 ml	300 ml	600 ml
7 Liter	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml	280 ml	350 ml	700 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	320 ml	400 ml	800 ml
9 Liter	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml	360 ml	450 ml	900 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	400 ml	500 ml	1000 ml
15 Liter	37,5 ml	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	375 ml	450 ml	600 ml	750 ml	1500 ml
20 Liter	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	800 ml	1000 ml	2000 ml

Schritte zur Nutzung der Tabelle am Beispiel von einer 5 Liter Anwendungslösung mit einer 2%igen Konzentration:

1. Entnehmen Sie bitte der ersten Spalte, wie viel Gebrauchslösung Sie herstellen möchten (5 Liter).
2. Dann gehen Sie nach rechts, bis Sie bei der gewünschten Konzentration angekommen sind (2%).
3. Nun ziehen Sie die benötigte Menge des Konzentrates von der fertigen Gebrauchslösung ab (5 Liter - 100 ml).
4. Abschließend müssen Sie nur noch die errechnete Menge Wasser und das Konzentrat vorsichtig zusammengießen (4,9 Liter Wasser und 100 ml Konzentrat zusammengießen).

Notwendige Konzentration und Einwirkzeit des jeweiligen Produktes bitte dem Etikett oder der Produktinformation entnehmen.