


# Konverter und Montage


Wählen Sie einen Konverter, der zu Ihrer Spritze passt

**Adec Style  
Syringes**

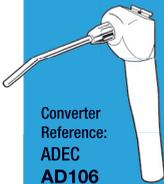

Converter  
Reference:  
**ADEC  
AD106**

**Belmont**

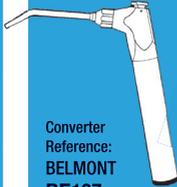

Converter  
Reference:  
**BELMONT  
BE107**

**Castellini  
Solar, Polo,  
Area, Firma**



Converter  
Reference:  
**CASTELLINI  
CA109**

**Castellini  
Three Steril,  
Multisteril,  
(Puma Units)**



Converter  
Reference:  
**CASTELLINI  
CA152**

**Cefla  
F3, F6, Anthos,  
Stern Webber  
and Castellini  
units**



Converter  
Reference:  
**LUZZANI  
LU146**

**Cefla  
Anthos, Castellini,  
Stern Webber  
F3, F6, F6L**



Converter  
Reference:  
**CEFLA  
CE153**

**Chirana**



Converter  
Reference:  
**CHIRANA  
CH132**

**DCI  
DCI, Belmont,  
Press Ring  
Syringes**



Converter  
Reference:  
**DCI  
DC110**

**Dental EZ**




Converter  
Reference:  
**EZ  
DE111**

**Faro**




Converter  
Reference:  
**FARO  
FA125**

**Faro**

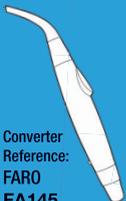

Converter  
Reference:  
**FARO  
FA145**

**GNATUS**

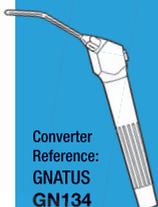

Converter  
Reference:  
**GNATUS  
GN134**

**Kavo  
573.0620  
573.0630**



Converter  
Reference:  
**KAVO  
KA101**

**Kavo  
573.0520  
573.0530**






Converter  
Reference:  
**KAVO  
KA103**

**Kavo  
773.0500**



Converter  
Reference:  
**KAVO  
KA138**

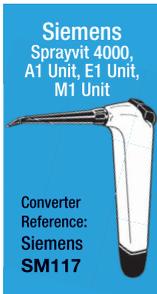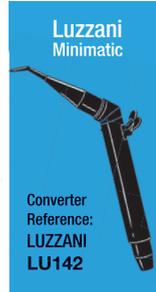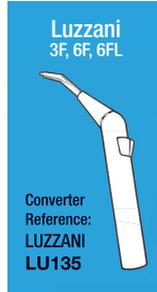

## Einfache Installation



1. Entfernen Sie den vorhandenen Spritzenansatz und/oder Adapter und befestigen Sie im Anschluß den Pro-Tip Adapter.
2. Drücken Sie den Pro-Tip Ansatz in den Adapter. Drehen Sie ihn danach, während Sie gleichzeitig den Adapter festhalten, um die Bajonett Verriegelung zu aktivieren.
3. Der Pro-Tip Ansatz ist sicher am Adapter angebracht, wenn die Lamellen in eine Linie gebracht sind.



Besuchen Sie unsere Webseite  
[www.protipdental.de](http://www.protipdental.de)  
für eine vollständige Übersicht der  
Konverter und Installationsvideos